




Vegye figyelembe a
használati útmutatót!

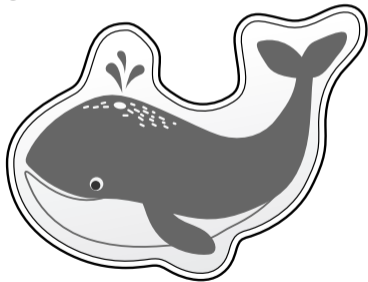

Zselés borogatások



hu **Használati útmutató**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 16115AB4X4IX • 2019-01

Kedves Vásárlónk!

Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy később ismét át tudja olvasni.

Ha megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A Tchibo csapata

Használat

A borogatásokat soha ne helyezze közvetlenül a bőrre, hanem tegyen alá egy puha, száraz, nem bolyhosodó kendőt (pl. egy kis kéztörölt).

Meleg borogatás - hasfájás, ízületi merevség, izomfájdalom enyhítésére (hideg láb és hideg kéz esetén is kiválóan használható)

- ▷ Helyezze a borogatásokat kb. 5 percre egy max. 60 °C-os meleg vízzel megtöltött edénybe. **A víz nem forrhat!** Legyen megfelelő mennyiségű víz az edényben, hogy a borogatás ne érintkezzen az edény forró aljával. Ne csupasz kézzel vegye ki a borogatásokat, hanem egy fa fogóval vagy hasonlóval - forrázási sérülések veszélye áll fenn! Hagyja a borogatásokat megfelelően lehűlni, mielőtt gyermekére helyezi.

Hideg borogatás - rándulások, duzzanatok, zúzódások, becsípődések, fogfájás, fejfájás, rovarcsípések enyhítésére alkalmas

- ▷ Helyezze a zselés borogatásokat kb. 2 órára a hűtőszekrénybe (ne a fagyasztóba!). Ezt követően máris használhatók.

Tisztítás / Tárolás

- Szükség esetén törölje le a zselés borogatásokat egy nedves ruhával.
Száras, hűvös, napfénytől védett helyen tárolja.



A borogatás megfelel a gyógyászati termékekre vonatkozó 93/42/EGK EU-irányelv előírásainak.



Gyártó: Handelshaus Dittmann GmbH
Kissinger Str. 68
97727 Fuchsstadt,
Germany (Németország)



Gyártás dátuma: 2019-03
(év/hónap)



Sarzs szám: V2019375307

Alkalmazási tartomány: +5 °C - +40~45 °C
(alsó és felső hőmérsékleti érték)

Cikkszám: 375 307

Biztonsági előírások



Rendeltetés

Meleg- vagy hidegborogatás alkalmazásához. Enyhíti a panaszokat, pl. hasfájás, ízületi merevség, izomfájdalom, duzzanatok, rovarcsípések, rándulások, zúzódások, fogfájás, fejfájás esetén.

Ne használja a borogatást sérült bőrön, Raynaud-szindróma esetén, vagy ha fájdalomcsillapítót vett be.

Ne használjon **meleg** borogatást láz vagy gyulladás esetén. Ilyen esetben a borogatásokat kizárólag hűtésre lehet használni.

VESZÉLY gyermekek esetében

- **Kisgyermekek fogzása esetén nem használható!** Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne harapjanak a zselés borogatásba, illetve ne rágnák azt. A borogatásban található zselé nem mérgező, de keserű anyagokat tartalmaz, arra az esetre, ha kisgyermekek mégis meg-rágnák a terméket, akkor a zselét ne nyeljék le és gyorsan kiköpjék.
- A termék nem játékszer. A terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

- A termék csak felnőtt felügyelete mellett használható.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - égési sérülések és erős lehűlés veszélye

- A terméket nem használhatják olyan személyek, akik nem érzékelik megfelelően a meleget vagy a hideget. A kisgyermek érzékenyebben reagálnak a hőre és a hidegre. Bizonyos betegségek, pl. a cukorbetegség, hőérzékelési zavarokkal járhatnak. Előfordulhat, hogy a fogyatékkal élő vagy gyengélkedő személyek nem tudják magukra felhívni a figyelmet, ha túl meleget vagy hideget érzékelnek. Ezért ne használja a terméket 3 éves kor alatti gyermekeknél, magatehetetlen, beteg, illetve hőt vagy hideget nem érzékelő személyeknél.

Ha kétségei lennének azzal kapcsolatban, hogy a gyermekének jól tesz-e a kezelés, vagy ha keringési zavarok állnak fenn, kérje ki orvosa véleményét a termék használata előtt.

- Az égési sérülések vagy a túlzott lehűlés elkerülése érdekében a használat előtt ellenőrizze a hőmérsékletet a csuklója belső felén.
Vegye figyelembe, hogy az alkalmazás időtartamától függően már 41 °C-os hőmérséklet is okozhat égési sérüléseket!
A borogatásokat ne helyezze közvetlenül a bőrre, hanem tegyen alá egy puha, száraz, nem bolyhosodó kendőt (pl. egy kis kéztörölt).
- A borogatásokat a hűtőszekrényben, és ne a fagyasztóban hűtse le. A fagyasztóban lehűtött borogatások adott esetben már néhány perc elteltével fagyási sérüléseket okozhatnak!
- A fej hideg borogatásához a hőmérséklet ne legyen túl alacsony. A lehűtött borogatást max. 10 percre használja megszakítás nélkül. Túlzott lehűlés veszélye áll fenn!
- A borogatásoknak idővel csökken a térfogatuk. Ha a termék térfogata jelentősen lecsökkent, akkor cserélje le újra.
- A kezelést követően hagyjon testének megfelelő időt a pihenésre, és csak ezután helyezze fel ismét a meleg vagy hideg borogatást.
- A borogatásokat csak külsőleg használhatja. Tartalmuk nem ehető.

Ha tartalmuk bőrrel érintkezik - pl. a fólia megsérülése esetén - folyó víz alatt mossa le az érintett bőrfelületeket.

FIGYELEM - anyagi károk

- A zselés borogatásokat ne melegítse, illetve ne hűtse túl, mert ezáltal megsérülhetnek.
- Óvja a borogatásokat az éles és hegyes tárgyaktól.
- Mielőtt hozzáérne a sérült borogatáshoz, várja meg, amíg az szobahőmérsékletű lesz. A borogatást többé nem szabad használni megjavítani vagy módosítani.
- **Mikrohullámú sütőben vagy sütőben nem melegíthető.**
- Ne tegye a borogatásokat fagyasztóba. A borogatásokat ne tegye ki 0 °C alatti hőmérsékletnek.
- Ne gyakoroljon nyomást a zselés borogatóra.

Hulladékkezelés

- A terméket helyezze el a hulladékgyűjtőben a hatályos jogszabályoknak és szabályozásoknak megfelelően. További információért forduljon az illetékes települési vagy városi önkormányzathoz.